



# FAVA YAZILIM GÜNCELLEME PROSEDÜRÜ

**Kurulumun ve cihazlarındaki güncellenmenin başarılı olabilmesi için bilgisayarınızın internete bağlı olması gerekmektedir.**

## 1. Programlarınız arasından FAVA programını çalıştırınız.

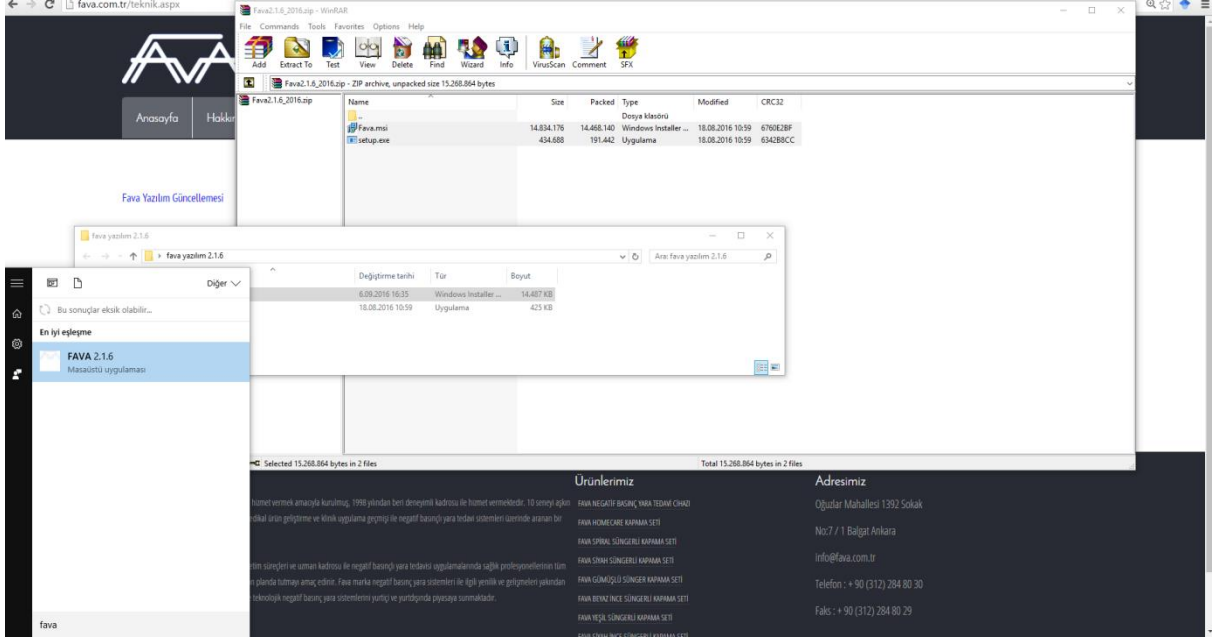


## 2. Açılan panelden kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz. Bilmiyor iseniz firmamız ile iletişime geçiniz.

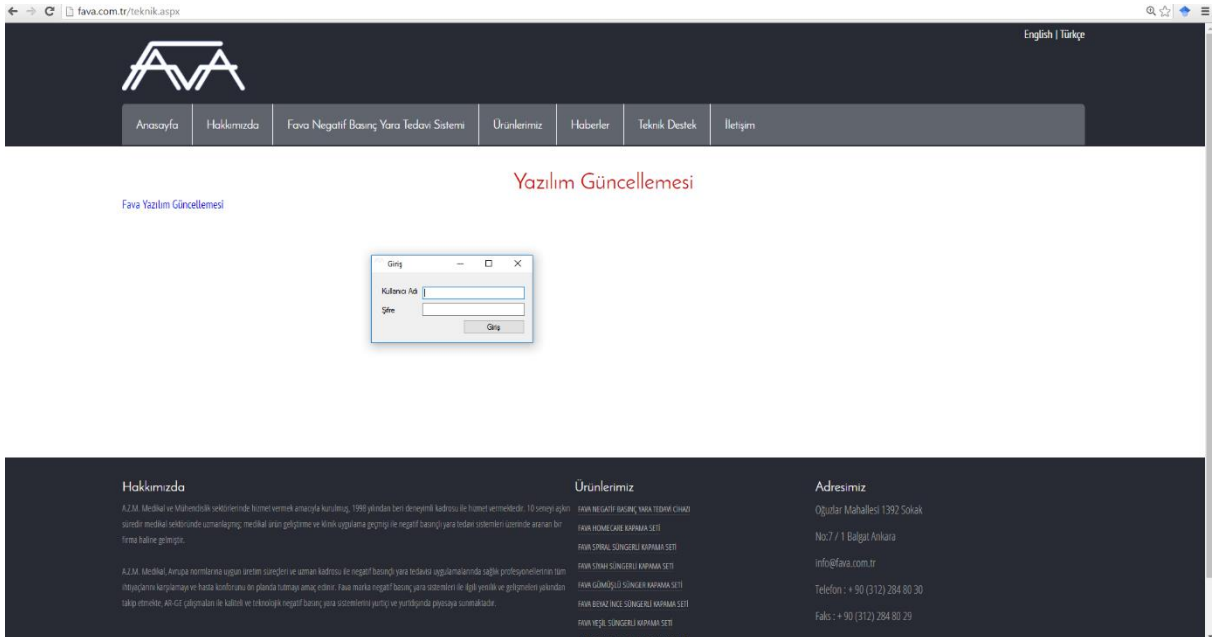

### 3. Cihazınız açık iken USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayınız. Program otomatik olarak cihazınızı algılayacak ve cihazınızın seri numarasını gösterecektir.

English | Türkçe



[Anasayfa](#) | [Hakkımızda](#) | [Fava Negatif Basıncı Yara Tedavi Sistemi](#) | [Ürünlerimiz](#) | [Haberler](#) | [Teknik Destek](#) | [İletişim](#)

#### Fava Yazılım Güncellemesi

Fava Device Firmware Upgrade v2.1.6

**ADIM 1 (Lütfen Seri Numarasını Gönderin)**

Cihaz Seri No: SN

**ADIM 2**

Lütfen cihaz yazılım güncellemesi için hazırladığınız cihaz menüsünden güncellenin.

**ADIM 3**

Lütfen USB kablosunu çıkarın  
Lütfen USB kablosunu tekrar takın

**ADIM 4**

#### Hakkımızda

A.Z.M. Medikal ve Mühendislik sektörlerinde hizmet vermek amacıyla kurulmuş, 1998 yılından beri deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir. 10 seneyi aşkın süredir medikal sektörde uzmanlaşmış medikal ürün geliştirme ve klinik uygulama geçmişi ile negatif basınçlı yara tedavi sistemleri üzerinde uzman bir firma haline gelmiştir.

A.Z.M. Medikal, Avrupa normlarına uygun üretim süreçleri ve uzman kadrosu ile negatif basınçlı yara tedavi uygulamalarında sağlık profesyonellerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve hasta konforunu ön planda tutmayı amaç edinir. Fava marka negatif basınç yara sistemleri ile ilgili yenilik ve gelişmeleri yakından takip etmek için AR-GE çalışmalarını ile bilimsel ve teknolojik negatif basınç yara sistemleri yurtiçi ve yurtdışında piyasaya sunmaktadır.


#### Ürünlerimiz

- FAVA NEGATİF BASINÇ YARA TEDAVİ CİHAZI
- FAVA HİMECİME KAPAMA SETİ
- FAVA SİRALI SİNGERLİ KAPAMA SETİ
- FAVA SİMA SİNGERLİ KAPAMA SETİ
- FAVA GÜMÜŞLÜ SİNGERLİ KAPAMA SETİ
- FAVA BEZİNCİ SİNGERLİ KAPAMA SETİ
- FAVA PEÇİŞİ SİNGERLİ KAPAMA SETİ

#### Adresimiz

Öğütar Mahallesi 1392 Sokak  
No:7 / 1 Balgat Ankara  
info@fava.com.tr  
Telefon : + 90 (312) 284 80 30  
Faks : + 90 (312) 284 80 29

English | Türkçe



[Anasayfa](#) | [Hakkımızda](#) | [Fava Negatif Basıncı Yara Tedavi Sistemi](#) | [Ürünlerimiz](#) | [Haberler](#) | [Teknik Destek](#) | [İletişim](#)

#### Fava Yazılım Güncellemesi

Fava Device Firmware Upgrade v2.1.6

**ADIM 1 (Lütfen Seri Numarasını Gönderin)**

Cihaz Seri No: 266/101015

**ADIM 2**

Lütfen cihaz yazılım güncellemesi için hazırladığınız cihaz menüsünden güncellenin.

**ADIM 3**

Lütfen USB kablosunu çıkarın  
Lütfen USB kablosunu tekrar takın

**ADIM 4**

#### Hakkımızda

A.Z.M. Medikal ve Mühendislik sektörlerinde hizmet vermek amacıyla kurulmuş, 1998 yılından beri deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir. 10 seneyi aşkın süredir medikal sektörde uzmanlaşmış medikal ürün geliştirme ve klinik uygulama geçmişi ile negatif basınçlı yara tedavi sistemleri üzerinde uzman bir firma haline gelmiştir.

A.Z.M. Medikal, Avrupa normlarına uygun üretim süreçleri ve uzman kadrosu ile negatif basınçlı yara tedavi uygulamalarında sağlık profesyonellerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve hasta konforunu ön planda tutmayı amaç edinir. Fava marka negatif basınç yara sistemleri ile ilgili yenilik ve gelişmeleri yakından takip etmek için AR-GE çalışmalarını ile bilimsel ve teknolojik negatif basınç yara sistemleri yurtiçi ve yurtdışında piyasaya sunmaktadır.

#### Ürünlerimiz


- FAVA NEGATİF BASINÇ YARA TEDAVİ CİHAZI
- FAVA HİMECİME KAPAMA SETİ
- FAVA SİRALI SİNGERLİ KAPAMA SETİ
- FAVA SİMA SİNGERLİ KAPAMA SETİ
- FAVA GÜMÜŞLÜ SİNGERLİ KAPAMA SETİ
- FAVA BEZİNCİ SİNGERLİ KAPAMA SETİ
- FAVA PEÇİŞİ SİNGERLİ KAPAMA SETİ

#### Adresimiz


Öğütar Mahallesi 1392 Sokak  
No:7 / 1 Balgat Ankara  
info@fava.com.tr  
Telefon : + 90 (312) 284 80 30  
Faks : + 90 (312) 284 80 29

4. “Seri No Gönder” butonu cihazınız algılandığı takdirde aktifleştirecektir. Butona basınız.



Herhangi bir hata oluştuğunda firmamız ile iletişime geçiniz.

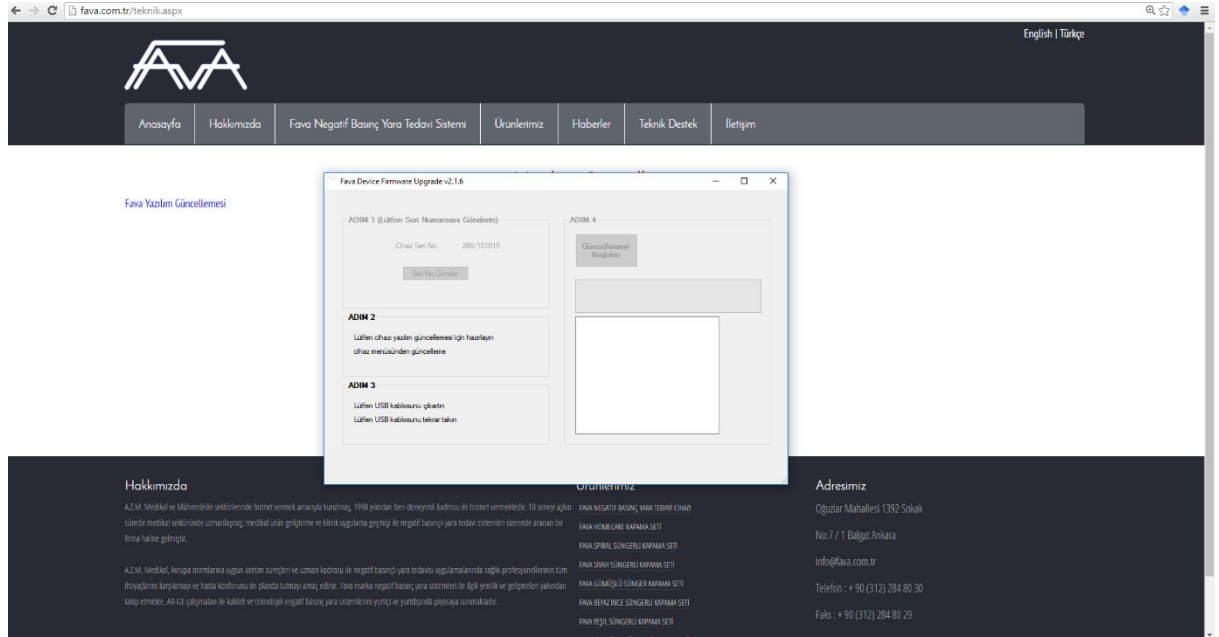

5. Fava cihazınızda, menüde bulunan ayarlara basılı tutunuz, aşağıdaki şifre paneli gelecektir. Firmamızdan edindiğiniz şifreyi girip “OK” tuşuna basınız.

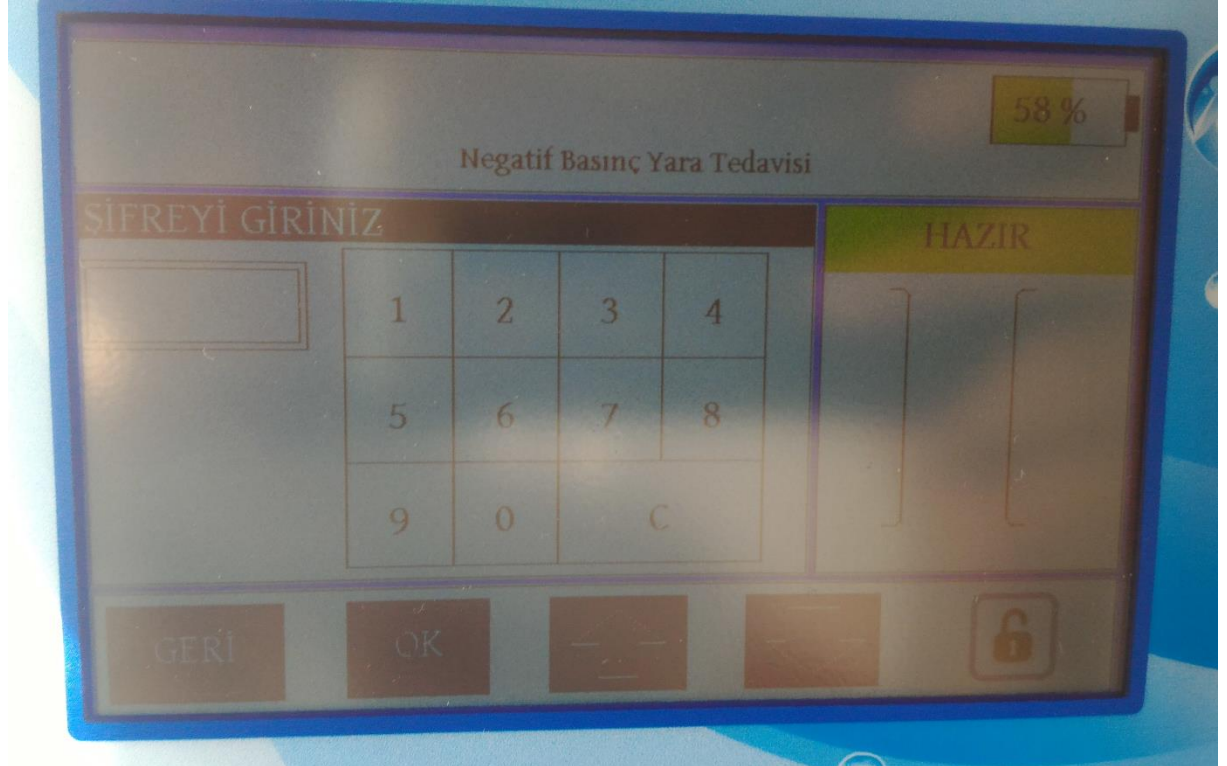


6. Karşınıza gelen “servis menüsü” den aşağı ok ile yazılım güncellemesine geliniz. “OK” tuşuna basınız.

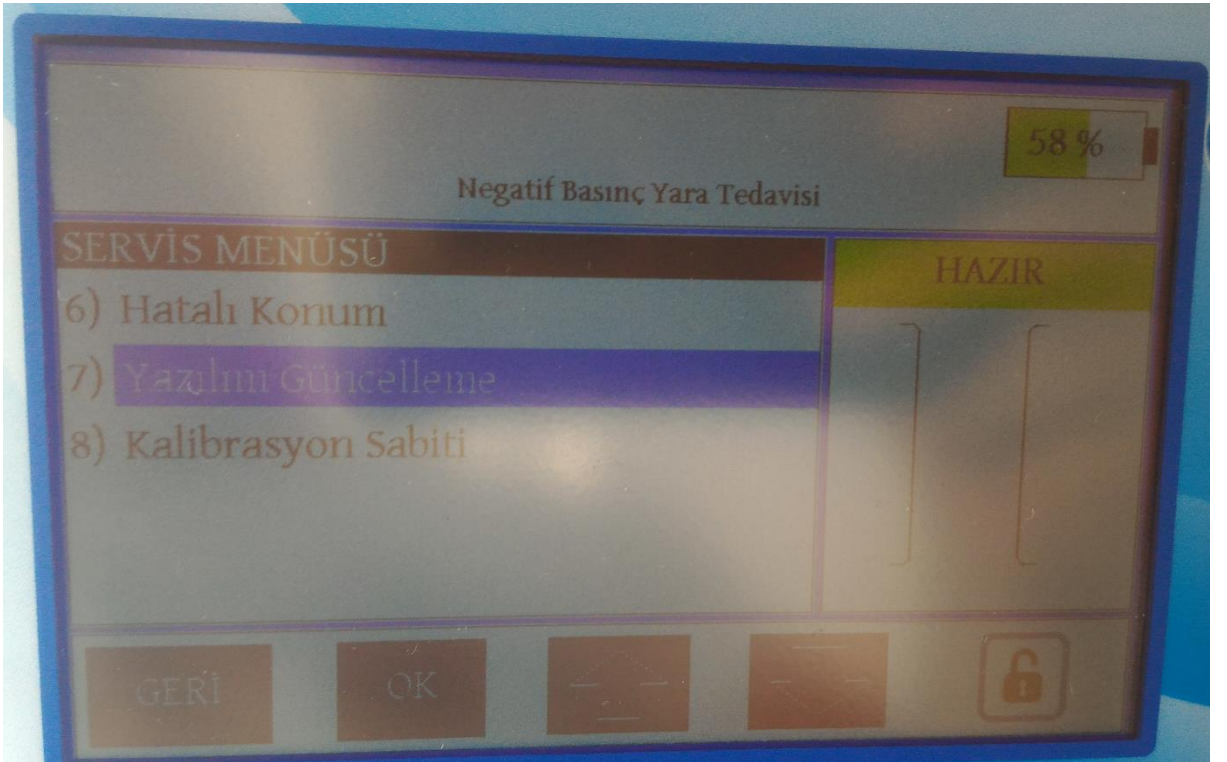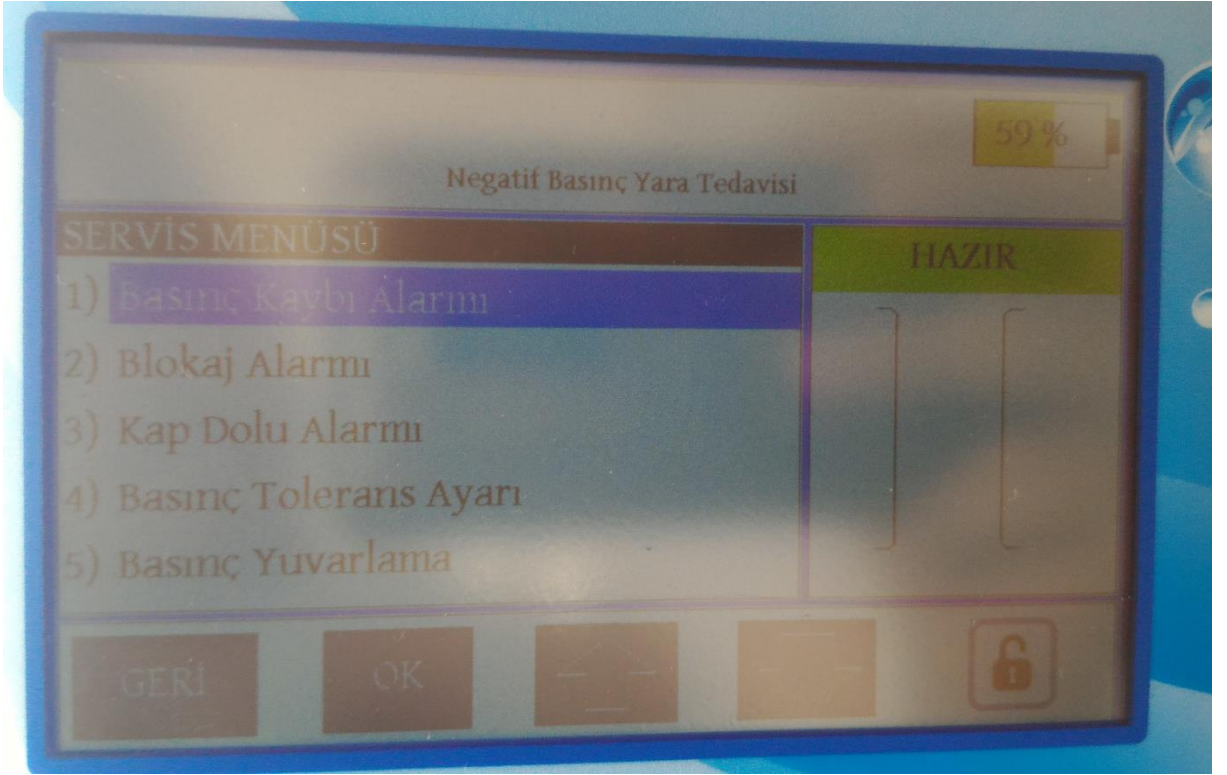





7. Çıkan panelde şifrenizi tekrar giriniz. Ardından "OK" tuşuna basınız.

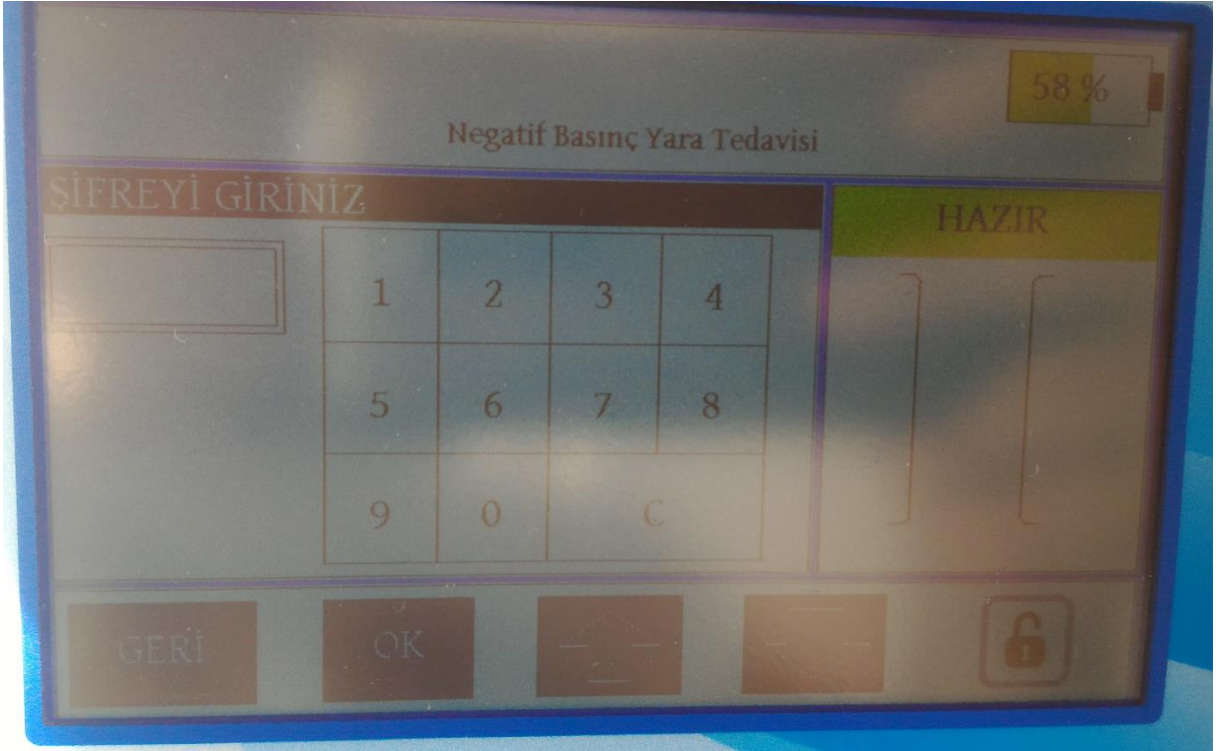

8. Cihazınızın ekranı kararacak, açma-kapama butonu sürekli yanık kalacaktır. USB yi çıkartıp tekrar takınız. Masaüstü uygulamanızda "Güncellemeyi Başlatın" butonu aktifleşecektir. **USB yi yazılım güncellemesi tamamlanana kadar çıkartmayınız.**

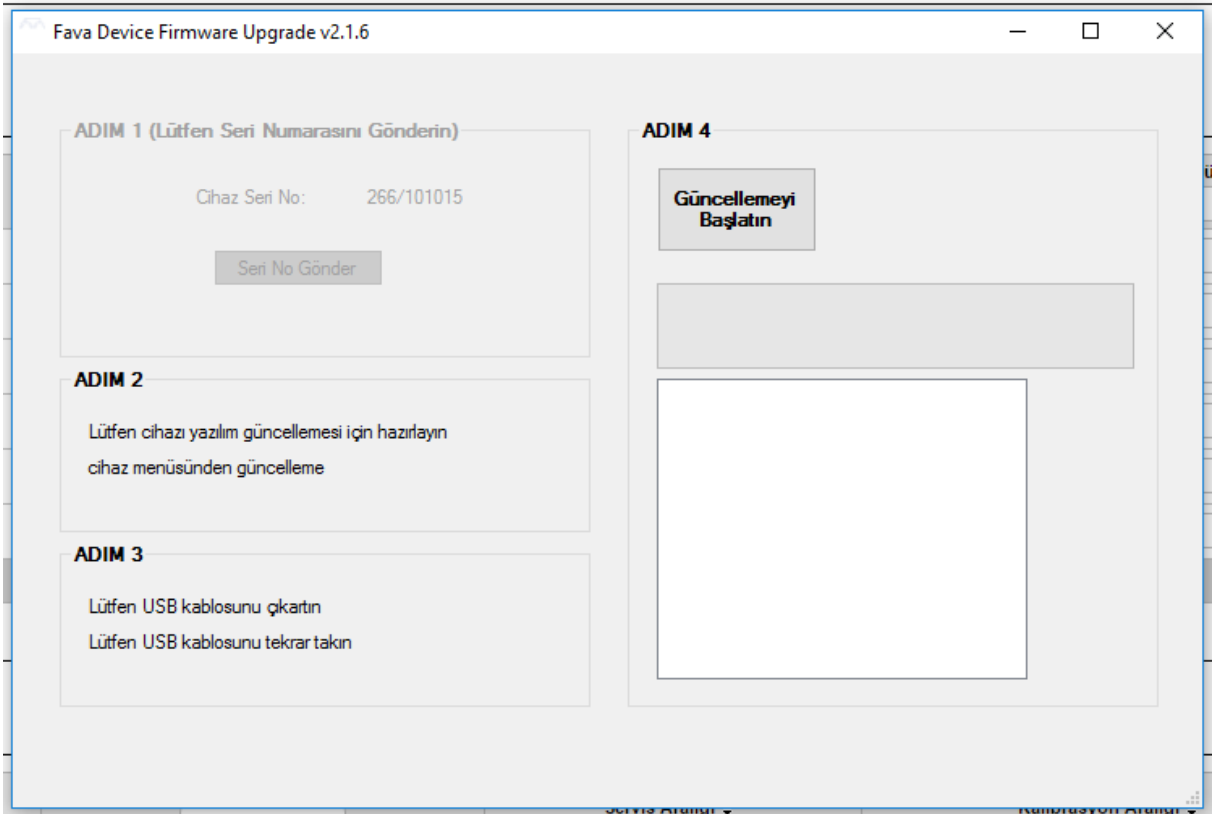

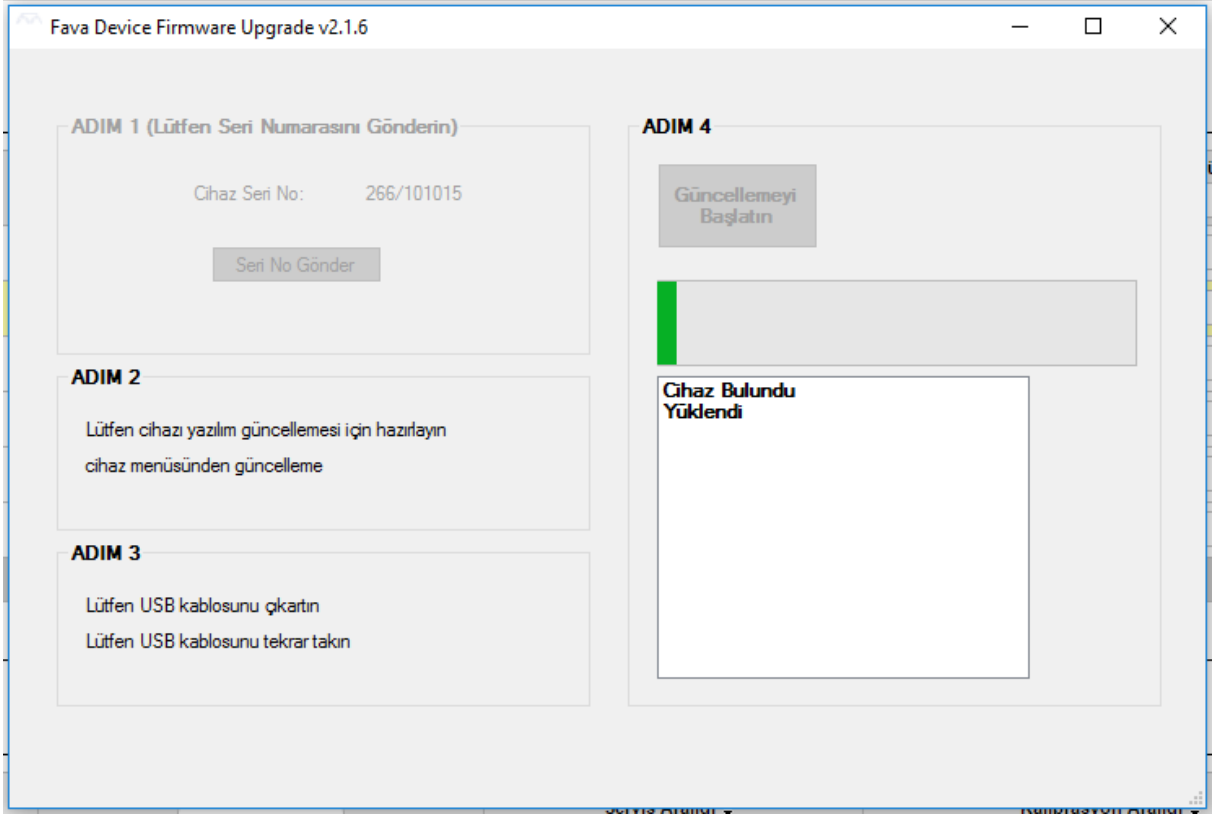

9. Yazılım güncellemesi tamamlandığında, hem masaüstü uygulamanız üzerinde “güncelleme tamamlandı” yazısı belirecek, hem de fava cihazınız yeniden açılacaktır.  
Cihazınızda yüklü olan yazılım versiyonu, cihaz açılışında sağ-alt köşede yazmaktadır.



10. Teşekkür Ederiz...